

## KURZANLEITUNG

- Nasenabstrichproben von Personen unter 18 Jahren sollten unter Aufsicht eines Erwachsenen entnommen werden.
- Personen, die älter als 70 Jahre sind, sollten sich der Entnahme des Nasenabstrichs bewusst sein oder benötigen ggf. Hilfe bei der Probennahme.
- Das Testergebnis muss innerhalb von 15 Minuten abgelesen werden. Lesen Sie kein Ergebnis nach 20 Minuten ab.
- Bitte waschen oder desinfizieren Sie sich vor und nach der Durchführung des Tests sorgfältig die Hände.
- Bitte treffen Sie beim Testen anderer Personen die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Gesichtsmaske, Handschuhe).

### Produkt-Komponenten

1. Test-Kassette
2. Extraktionspuffer
3. Steriler Einmaltupfer
4. Bioabfallbeutel
5. Kurzanleitung
6. Gebrauchsanweisung
7. Röhrenständer (im Umkarton)

### Weitere benötigte Artikel (nicht im Testset enthalten)


Timer oder Uhr



Demonstrationsvideo




## Testverfahren

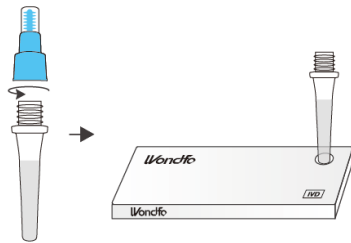


### Schritt 1

Nehmen Sie das Extraktionspufferröhrchen heraus, schrauben Sie den Deckel ab und stellen Sie das Röhrchen in den Ständer (dieser befindet sich im Umkarton, siehe oben).

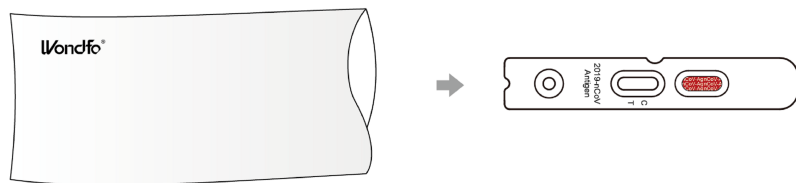


### Schritt 2

Nehmen Sie die Testkassette aus dem Beutel und legen Sie sie flach hin.

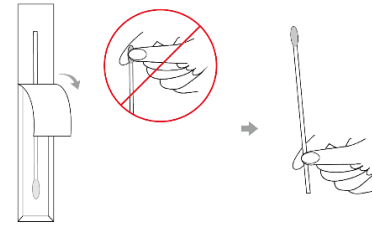

### Schritt 3


Nehmen Sie den Tupfer aus dem Behälter und achten Sie darauf, das weiche Ende, welches die saugfähige Spitze ist, **NICHT** zu berühren.

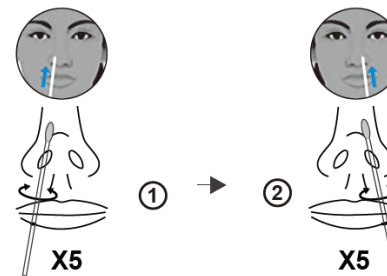

### Schritt 4


Führen Sie vorsichtig die **GESAMTE** saugfähige Spitze des Tupfers in Ihre Nasenlöcher ein. Nehmen Sie die Probe an der Nasenwand, indem Sie den Tupfer **5x** kreisförmig gegen die Nasenwand drehen. Entfernen Sie den Tupfer langsam aus dem Nasenloch (dieser Schritt sollte etwa 15 Sek. dauern, um sicherzustellen, dass Sekret und Zellen gesammelt werden).

Wiederholen Sie den Vorgang mit **demselben Tupfer** im anderen Nasenloch.

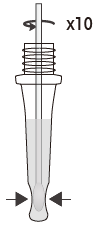


### Schritt 5

Führen Sie den Tupfer in das Extraktionspufferröhrchen ein und tauchen Sie die gesamte Spitze in den Extraktionspuffer. Drehen Sie den Tupfer etwa **10x** und drücken Sie die Tupferspitze durch den unteren Teil des Pufferröhrchens zusammen.

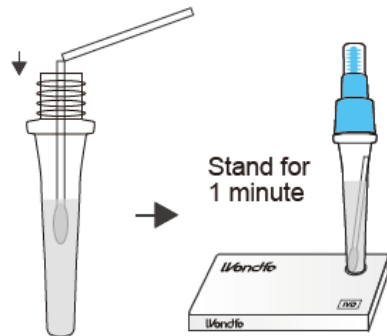


### Schritt 6

Brechen Sie den Tupfer an der Bruchstelle ab, lassen Sie die Tupferspitze im Röhrchen, verschließen Sie den Deckel und lassen Sie das Röhrchen für 1 Minute auf dem Röhrchenständer stehen.

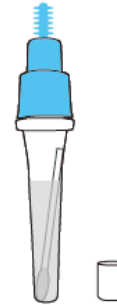

### Schritt 7

Schrauben Sie die kleine Kappe am oberen Ende des Extraktionspufferröhrchens ab.

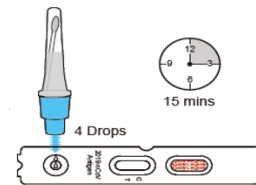

### Schritt 8

Legen Sie die Kassette flach hin und geben Sie 4 Tropfen verarbeitete Probe in die Probenvertiefung. Warten Sie 15 Minuten und lesen Sie die Ergebnisse ab. Lesen Sie keine Ergebnisse mehr nach 20 Minuten ab.



### Schritt 9

Nach Beendigung des Tests geben Sie alle Materialien des Testsets in den Beutel für biologischen Sondermüll und entsorgen ihn gemäß den örtlichen Richtlinien für die Entsorgung infektiöser Stoffe.



Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.

Add: No. 8 Lizhishan Road, Science City, Luogang District, 510663, Guangzhou, P.R. China

Tel: (+86)400-830-8768 E-mail: sales@wondfo.com.cn Websites: en.wondfo.com.cn

Wondfo reserves all rights. All contents of this brochure are copyrighted by Wondfo.




## Schritt 10

Desinfizieren Sie ihre Hände erneut.

## Schritt 11

Ergebnis-Interpretation

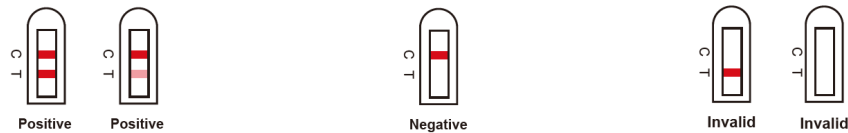

### Positiv (+)

Es erscheinen zwei rote Linien. Eine in der oberen Hälfte und eine in der unteren Hälfte. COVID-19 wurde erkannt.

**HINWEIS:** Es spielt keine Rolle, ob eine der Linien, aus denen sich die Testlinie (T) zusammensetzt, heller oder dunkler ist als die andere; das Ergebnis ist "positiv".

### Negatives Ergebnis (-)

Eine einzelne rote Linie in der oberen Hälfte. COVID-19 wurde nicht erkannt.

### Ungültig

Wenn Sie keine Linie auf der oberen Hälfte sehen, ist der Test ungültig. Es wird empfohlen, den Test durch Entnahme eines neuen Nasenabstrichs zu wiederholen.